

Paso a Paso
para la **Limpieza** y
Esterilización de
los **instrumentos**
de **manicura.**



¡PROTÉJASE Y PROTEJA A SUS CLIENTES!

E-BOOK



¡Vacúnese contra la Hepatitis B! En Brasil, la vacuna está disponible e gratuitamente en los centros de salud, y el esquema básico consiste en 3 dosis: 1.^a dosis, 2.^a dosis después de 30 días, y 3.^a dosis, 6 meses después de la 1.^a dosis (eficaz en el 95%).

¡PROTÉJASE Y PROTEJA A SUS CLIENTES!

E-BOOK

Utilice siempre:



- Guantes de procedimiento desechables para cada cliente. Lávese las manos antes de ponérselos y después de quitárselos.
- Delantal limpio.
- Gafas de seguridad.
- Material desechable para cada cliente: lima de uña y/o pies, quitaesmalte, "kit" emoliente de cutículas (guantes de crema).
- Kit esterilizado para cada cliente contenga una espátula y un alicate para cutículas.
- Toallas limpias o desechables para el procedimiento.

¡PROTÉJASE Y PROTEJA A SUS CLIENTES!

E-BOOK



Limpieza y Esterilização dos Instrumentais

Para el siguiente procedimiento, utilice guantes de goma gruesos.

1

Deje los instrumentos en **inmersión** en detergente enzimático durante diez minutos.



2

Lave los alicates y las espátulas con un cepillo de mango largo.



3

Enjuague bien los instrumentos y séquelos con una toalla de papel.

4



Inspección visual. Utilice una lupa para facilitar esta tarea. Compruebe que el alicate está completamente limpio. Si es necesario, lávelo de nuevo.

5

Utilice un **lubrificante** adecuado para los instrumentos (Premix Slip®). No enjague ni limpie para no eliminar la capa protectora.



6

Utilice un pulverizador o un gotero para lubricar las zonas articuladas. Mueva los alicates para facilitar la penetración del líquido.



7

Proteja las puntas de los alicates con una **gasa** o algodón.



8

Introduzca cada “kit” (compuesto por un alicate y una espátula) en un sobre.

9

Coloque los sobres en el soporte (1 en cada espacio).



10

Coloque la cantidad de **agua destilada** en el vaso medidor y viértala directamente en la cámara del autoclave, conforme solicitado en el Manual de Instrucciones del equipo.



11



Con el soporte para sobres en el autoclave, realice el ciclo de **esterilización** de acuerdo con las recomendaciones de uso. Nota: Para el modelo Vitale 5 litros, el soporte para 8 sobres viene con el equipo. Para los modelos Vitale Class y Vitale Class CD, el soporte para sobres es un accesorio vendido separadamente y tiene capacidad para 13 sobres (9 x 26 cm) en el modelo de 12 litros y 26 sobres en el modelo de 21 litros, utilizando 2 soportes para sobres.



Autoclave Vitale 5L

12

Si posee una Autoclave Vitale Class 12/21 y Vitale 5 litros, abra la puerta para la etapa de secado. Para el modelo Vitale Class CD la etapa de secado es automática con la puerta cerrada. Espere hasta que el “display” muestre el mensaje “Esfriando” para abrir la puerta.

¡TIP!

GUANTES GRUESOS

No te quites los guantes después del procedimiento. Primero, lávelos con agua y jabón, séquelos con una toalla de papel y desinféctelos con alcohol al 70%, después quítelos y guárdelos en un lugar adecuado.



Vea los videos de **Instruções de Uso** e **dicas** sobre **biossegurança**.

¡ATENCIÓN!

El autoclave es el equipo más recomendado para esterilizar de instrumentos resistentes al calor. Seguro y fácil de operar, funciona con ciclos entre 12° C y 134° C en presencia de vapor y presión. Póngase en contacto con nosotros por correo electrónico a crc@crstofoli.com o a través del Blog Bioseguridad www.crstofoli.com/bioseguridad



BLOG
BIOSEGURIDAD

www.crstofoli.com/bioseguridad

Conozca los productos Cristófoli



Autoclave Vitale Class
12 y 21 Litros



Autoclave Vitale
5 Litros



Selladora Cristófoli



Incubadora Biológica
Cristófoli



Indicador Biológico
SteriTest



Indicador Químico
SIL-250




Indicador Químico
Integrador SteamPlus




Sobres para
Esterilización Protex-E



Empaques Tubulares
para Esterilización Protex-R

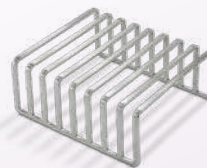

Vitale 5 litros

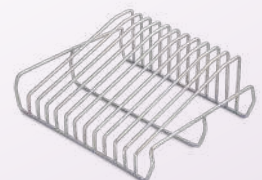

Vitale 12 y 21 litros

Soporte para Sobres



**Cristófoli Equipamentos
de Biossegurança Ltda.**

Calle São José, 3209 - Campo Mourão / PR
Código Postal 87307-799 ☎ 44 3518-3431
☎ +55 0800 044 0800 🌐 www.cristofoli.com



**BLOG
BIOSSEGURANÇA**

www.cristofoli.com/biosseguranca

www.cristofoli.com/bioseguridad - liliana@cristofoli.com