


INSTRUÇÕES RÁPIDAS

COMO USAR SUA AUTOCLAVE VITALE CRISTÓFOLI



01 Após realizar o Desbloqueio e o Ajuste de Altitude o equipamento está pronto para uso.

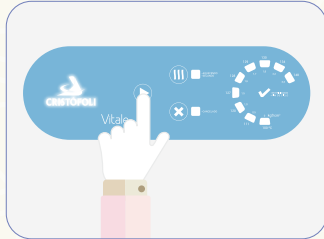

02 Para ligar a autoclave conecte o cabo de energia à rede elétrica e pressione a tecla **início**. A Logo Cristófoli se acenderá e 3 bips soarão.



03 Abra a porta e retire as bandejas.




04 Utilizando o copo, coloque água na câmara até atingir a marca **nível de água**.



05 Coloque novamente as bandejas e abasteça a autoclave com os artigos a serem esterilizados. Acomode os envelopes com a parte de papel voltada para cima.




06 Feche a porta da autoclave, empurrando-a e movendo o fecho totalmente para baixo até o final do curso.

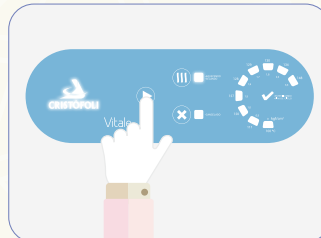

07 Pressione a tecla **início**. A autoclave emitirá 1 bip e o LED **Aquecendo/Secando** estará aceso. Em seguida, a autoclave iniciará o aquecimento.




08 Assim que a temperatura e pressão ideais para o início da esterilização forem atingidas, 1 bip será emitido e você poderá ouvir um estalo, que acontece pelo fechamento da válvula solenoide. O LED **Esterilizando/Fim de Ciclo**, indicando o início da etapa de esterilização.

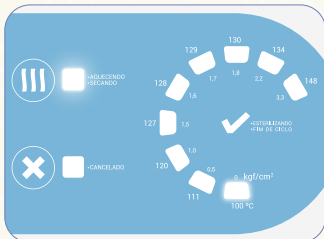

09 Ao término da esterilização, a autoclave emitirá 1 bip, iniciando a etapa de despressurização e a barra de LEDs indicativas indicará pressão "0" ao final deste processo.



10 Aguarde o momento em que os 2 bips serão emitidos a cada 4 segundos, indicando que a porta deve ser entreaberta para o início da secagem. Ao final do processo de secagem, a autoclave emitirá 5 bips e o LED ✓ permanecerá aceso.

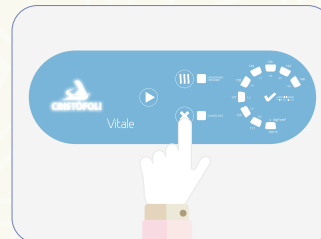

11 Para voltar ao modo de espera, pressione a tecla **Cancela**. Para desligar o equipamento, pressione a tecla **Cancela** por 2 segundos.

ATENÇÃO

- ✓ A autoclave é um equipamento para esterilização a vapor, trabalha com temperatura e pressão elevadas. Deve ser manuseada por profissionais capacitados e mantida em local de acesso controlado.
- ✓ Realize a manutenção preventiva na autoclave conforme especificado no manual de instruções.
- ✓ Realize os testes biológicos:
 - Após a instalação, no primeiro uso.
 - Rotina (diária, semanal, ou de acordo com a legislação do seu estado ou município para o seu tipo de serviço).
 - Após manutenção preventiva ou corretiva.
- ✓ Após a manutenção ou transferência de local (prédio, cidade, estado) também é necessário realizar um novo Ajuste de Altitude na sua autoclave. Para mais informações, consulte o Manual de Instruções.

Dica

- ✓ Utilize o Suporte para Envelopes que otimiza a capacidade da autoclave, proporcionando uma esterilização eficiente e secagem perfeita do material, além da economia de energia elétrica, tempo e água destilada.

Importante!
Leia atentamente o Manual de Instruções que acompanha o equipamento.



Assista ao vídeo no Youtube
Autoclave Vitale Como Usar



✉ cristofoli@cristofoli.com



Blog Biossegurança: www.cristofoli.com/biosseguranca
Consultoria gratuita em biossegurança

Cristófoli,
a marca da proteção.