

INSTRUÇÕES RÁPIDAS

COMO USAR SUA AUTOCLAVE VITALE CD CRISTÓFOLI



01 Após realizar o Desbloqueio e o Ajuste de Altitude o equipamento está pronto para uso.



02 Para ligar a autoclave conecte o cabo de energia à rede elétrica e pressione a tecla **início**. O display exibirá as informações iniciais, emitindo 3 bips para marca e 1 bip para modelo e capacidade, e a mensagem: SELECIONE UM PROGRAMA.



03 Abra a porta e retire as bandejas.



150 ml - Vitale CD 12
250 ml - Vitale CD 21
Ou Nível de água

04 Utilizando o copo, coloque água na câmara até atingir a marca nível de água.



05 Coloque novamente as bandejas e abasteça a autoclave com os artigos a serem esterilizados. Acomode os envelopes com a parte de papel voltada para cima.



06 Feche a porta da autoclave, empurrando-a e movendo o fecho totalmente para baixo até o final do curso.



07 Pressione a tecla início, selecione um programa utilizando as teclas ◀ ou ▶ e pressione a tecla início novamente para começar o ciclo.



08 Assim que a autoclave atingir a temperatura e pressão de esterilização, o display alternará as mensagens: **ESTERILIZANDO**, **TEMPO RESTANTE** e **TEMPO DECORRIDO**.



09 Ao término da esterilização o display exibirá a mensagem **DESPRESSURIZANDO**. A secagem acontecerá automaticamente, com a porta fechada e o display alternará entre as mensagens **SECANDO**, **TEMPO RESTANTE** e **TEMPO DECORRIDO**.



10 Ao final da secagem, a autoclave emitirá uma sequência de bips, indicando a necessidade da abertura da porta, deixe-a entreaberta para acelerar o resfriamento do material. O display alternará entre as mensagens **ESFRIANDO**, **TEMPO RESTANTE** e **TEMPO DECORRIDO**.



11 Após o término do resfriamento a autoclave emitirá 5 bips e o display exibirá a mensagem **CICLO CONCLUÍDO** e o tempo total do ciclo.



12 Para voltar ao modo de espera, pressione a tecla **Cancela**. Para desligar o equipamento, pressione a tecla **Cancela** por 2 segundos.

Dica

Utilize o Suporte para Envelopes que otimiza a capacidade da autoclave, proporcionando uma esterilização eficiente e secagem perfeita do material, além da economia de energia elétrica, tempo e água destilada.



Assista ao vídeo
no Youtube
**Como Usar a
Autoclave Vitale CD**



✉ cristofoli@cristofoli.com



Blog Biossegurança: www.cristofoli.com/biosseguranca
Consultoria gratuita em biossegurança

Cristófoli,
a marca da proteção.