


**USO PRETENDIDO**

Este equipamento foi desenvolvido para facilitar o transporte de Racks e Cestos até a Câmara da Autoclave.

**INSTRUÇÕES DE MONTAGEM**

- ▶ Separe as peças dos itens de 1 a 6 e dos itens de A a D, conforme relacionado na tabela 1.
- ▶ Inicie a montagem fixando os Suportes (A) na Prateleira (3) rosqueando os Parafusos (C) nos Suportes (A).
- ▶ Posicione a Prateleira (3) alinhando os furos dos Suportes (A) com os furos da parte inferior da Estrutura frontal (2). Rosqueie os parafusos (C) na Estrutura Frontal (2).
- ▶ Posicione o outro lado da prateleira (3) alinhando os furos dos Suportes (A) com os furos da parte inferior da Estrutura com apoio para mãos (1) e rosqueie os parafusos (C)
- ▶ Fixe as bases das guias (6) inserindo os Parafusos (C) através dos furos da parte superior das Estruturas (1 e 2).
- ▶ Rosqueie os rodízios (B) na parte inferior das Estruturas (1 e 2), certifique-se de que todos estejam rosqueados por igual para que o carro fique nivelado.
- ▶ Rosqueie duas porcas (D) nos dois parafusos soldados nas Guias direita e esquerda (4 e 5).
- ▶ Posicione os parafusos das Guias (4 e 5) através dos furos da parte superior das Estruturas (1 e 2).
- ▶ Rosqueie mais uma porca (D) em cada parafuso das Guias (4 e 5).
- ▶ Utilize o aperto das porcas (D) para fazer o nivelamento de altura das Guias (4 e 5) em relação à câmara da autoclave.

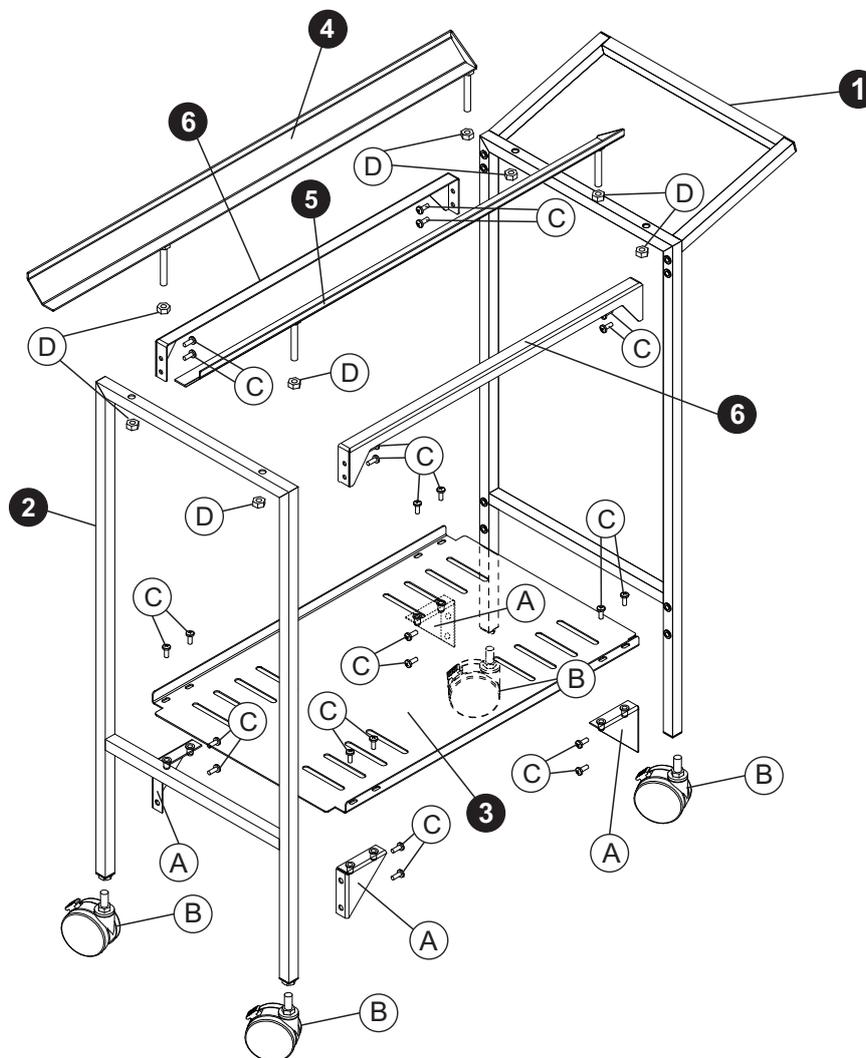

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO	ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO
1	1	ESTRUTURA COM APOIO PARA AS MÃOS	A	4	SUPORTE DA PRATELEIRA
2	1	ESTRUTURA FRONTAL	B	2	RODA CPT 4 PU C/ FREIO E ESPIGA 3"
3	1	PRATELEIRA	C	24	PARAFUSO CABEÇA PANELA FENDA CRUZADA M6X16MM
4	1	GUIA DIREITA	D	8	PORCA SEXTAVADA CL8 M10
5	1	GUIA ESQUERDA			
6	2	BASE DAS GUIAS			

Tabela 1

## DADOS TÉCNICOS

Dimensões (cm) (L x A x P)	Peso Líquido	Peso Bruto	Material
41 x 107,8 x 114,3 cm	17 kg	18 kg	Aço inox e aço-carbono com pintura eletrostática

Tabela 2

## MANUTENÇÃO

- ▶ **Limpeza** - Deve ser realizada com um pano que não solte fiapos, umedecido com água e detergente neutro, em seguida, passe um pano seco, finalizando com um pano umedecido em álcool 70%.
  - ▶ **Limpeza dos rodízios** - Utilize uma escova de cerdas macias, umedecida em água e detergente neutro, em seguida, seque com um pano que não solte fiapos. Se algum dos rodízios estiver travado, providencie a substituição.
- Obs.:** Rodízios extras podem ser adquiridos na Rede de Assistência Técnica Autorizada, para isso, visite [www.cristofoli.com](http://www.cristofoli.com) e clique em "Suporte e Atendimento" e depois em "Assistência Técnica Autorizada".

## TERMOS DE GARANTIA

A **Cristófoli Equipamentos de Biossegurança** garante por 01 (um) ano, dos quais 03 (três) meses referem-se à garantia legal (estabelecida pelo inciso II, art. 26, do CDC) e 09 (nove) meses à garantia contratual (estabelecida pelo art. 50, do CDC), o Carro Externo para Material contra qualquer defeito de fabricação a partir da data de emissão da Nota Fiscal.

### A garantia será imediatamente invalidada nos casos de:

- Problemas decorrentes de intempéries naturais (tais como inundações, desabamentos, raios, etc.).
- Sinistro (furto ou roubo).
- Danos causados por incêndios ou quedas.
- Utilização de materiais não conformes para o tipo de produto como descrito no manual de instrução.
- Adulteração e/ou rasura na nota fiscal de compra ou de prestação de serviço do produto.
- Utilização de acessórios e materiais não especificados pela Cristófoli.
- Alterações realizadas no produto por conta do cliente.
- Reparos efetuados por técnicos que não fazem parte da Rede de Assistência Técnica Autorizada Cristófoli.

## CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE - CRC

Em caso de dúvidas, reclamações ou sugestões, contate a Cristófoli através da Central de Relacionamento com o Cliente - CRC pelo telefone 0800-044-0800, (44) 3518-3499 ou e-mail: [crc@cristofoli.com](mailto:crc@cristofoli.com).

O horário de atendimento da CRC é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30min às 16h30min.