


## USO PRETENDIDO

Este equipamento foi desenvolvido para facilitar a acomodação e retirada de cargas das câmaras das autoclaves hospitalares CHR100.

## INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

- Separe as peças 1, 2 e 3 dos itens 4 e 5 (identificados na tabela 1).
- Orientando-se pelo desenho técnico (Fig. 1), utilize os parafusos (4) e as porcas borboleta (5) para fixar as colunas (3) nos cantos da base com rodízios (1). As cabeças dos parafusos (4) devem ficar na parte interna da base.
- Para fixar a prateleira superior (2), é possível escolher entre 4 regulagens de altura de acordo com os orifícios presentes na parte superior das colunas (3). Encaixe a prateleira superior (2) entre as colunas (3) e posicione-a conforme a altura escolhida.
- Utilizando os parafusos (4) e as porcas borboleta (5), fixe a prateleira superior apertando as porcas.

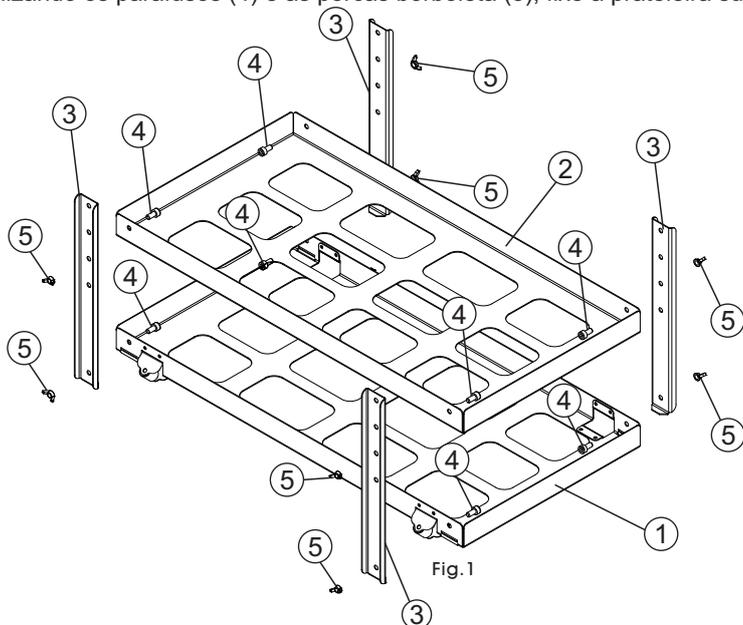

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO
1	1	BASE C/ RODÍZIOS
2	1	PRATELEIRA
3	4	COLUNA
4	8	PARAFUSO ALLEN M6 X12MM
5	8	PORCA BORBOLETA

Tabela 1

Imagens meramente ilustrativas.

## MANUTENÇÃO

- Limpeza geral: utilize um pano que não solte fiapos umedecido com água e detergente neutro em todas as superfícies, em seguida, passe um pano seco e finalize com um pano umedecido em álcool 70°.
- Limpeza dos rodízios: limpe com uma escova de cerdas macias umedecida em água e detergente neutro, em seguida, seque com um pano que não solte fiapos. Se algum dos rodízios estiver travado, providencie a substituição.

**Obs.:** Rodízios extras podem ser adquiridos na Rede de Assistência Técnica Autorizada, para isso, acesse o site [www.cristofoli.com](http://www.cristofoli.com), clique em "Suporte e Atendimento" e em "Assistência Técnica Autorizada".

## DADOS TÉCNICOS

Dimensões (cm) (L x A x P)	Peso Líquido	Peso Bruto	Material
34,2 x 30,3 x 60,2 cm	3,6 kg	4 kg	Aço inox

Tabela 2

## TERMOS DE GARANTIA

A **Cristófoli Equipamentos de Biossegurança** garante por 01 (um) ano, dos quais 03 (três) meses referem-se à garantia legal (estabelecida pelo inciso II, art. 26, do CDC) e 09 (nove) meses à garantia contratual (estabelecida pelo art. 50, do CDC), o Rack para Cargas contra qualquer defeito de fabricação a partir da data de emissão da Nota.

### A garantia será imediatamente invalidada nos casos de:

- Problemas decorrentes de intempéries naturais (tais como inundações, desabamentos, raios, etc.).
- Sinistro (furto ou roubo).
- Danos causados por incêndios ou quedas.
- Utilização de materiais não conformes para o tipo de produto como descrito no manual de instrução.
- Adulteração e/ou rasura na nota fiscal de compra ou de prestação de serviço do produto.
- Utilização de acessórios e materiais não especificados pela Cristófoli.
- Alterações realizadas no produto por conta do cliente.
- Reparos efetuados por técnicos que não fazem parte da Rede de Assistência Técnica Autorizada Cristófoli.

## CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CLIENTE - CRC

Em caso de dúvidas, reclamações ou sugestões, contate a Cristófoli através da Central de Relacionamento com o Cliente - CRC pelo telefone 0800-044-0800, (44) 3518-3499 ou e-mail: [crc@cristofoli.com](mailto:crc@cristofoli.com).

O horário de atendimento da CRC é de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30min às 16h30min.