

Conheça os produtos Cristófoli



Autoclave Vitale
12 e 21 Litros



Autoclave Vitale
5 Litros



Seladora Cristófoli



Mini-Incubadora
Cristófoli




Indicador Biológico
SteriTest




Indicador Químico
SIL-250



Envelopes Autosselantes

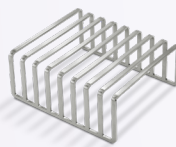

Vitale 5 litros

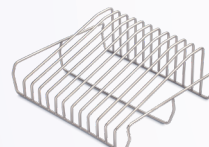

Vitale 12 e 21 litros

Suporte para Envelopes



Indicador Químico
Integrador SteamPlus



**Cristófoli Equipamentos
de Biossegurança Ltda.**
Rua São José, 3209 - Campo Mourão / PR
CEP 87307-799 ☎ 44 3518-3431
📞 0800 044 0800 🌐 www.cristofoli.com



Consultoria gratuita em biossegurança:
www.cristofoli.com/biosseguranca - liliana@cristofoli.com

*Fonte: Oliveira, ACDs; Focaccia, R. Survey of hepatitis B and C infection control: procedures at manicure and pedicure facilities in São Paulo, Brazil - Braz J Infect Dis 2010; 14(5):502-507 PPM Rev.8 / 2025 - MPB.01015



WWW.CRISTOFOLI.COM

Passo a Passo
para **Limpeza** e
Esterilização dos
instrumentais
para
manicures.



CRISTÓFOLI, A MARCA DA PROTEÇÃO.

PROTEJA VOCÊ E SEUS CLIENTES!

PASSO A PASSO



Vacinação contra Hepatite B: Disponível e gratuita em postos de saúde para profissionais do ramo: 1ª dose, 2ª dose após 30 dias, e 3ª dose 6 meses após a 1ª (eficaz em 95%).



1 Deixe os instrumentos em **imersão** em detergente enzimático por dez minutos.



2 Lave os alicates e as espátulas com escova de cabo longo.



3 Enxágue abundantemente os instrumentais e seque-os com papel toalha.



7 Proteja as pontas dos alicates com gaze ou algodão.



8 Embale cada kit (composto por um alicate e uma espátula) em um envelope.



9 Posicione os envelopes no suporte (1 em cada espaço).



Use sempre:

- Luvas de procedimento descartáveis para cada cliente. Lave as mãos antes de colocá-las e depois de retirá-las.
- Avental limpo.
- Óculos de proteção.
- Material descartável para cada cliente: lixa de unha e/ou de pé, palito para retirar esmalte, kit emoliente para cutícula (luvinha de creme).
- Kit esterilizado para cada cliente contendo uma espátula e alicate para cutícula.
- Toalhas limpas ou descartáveis para cada procedimento.



4 **Inspeção visual.** Para maior facilidade utilize uma lente de aumento ou uma lupa. Verifique se o alicate ficou totalmente limpo. Se necessário lave novamente.



5 Utilize **lubrificante** próprio para instrumental (Premix Slip®). Não enxágue nem enxugue para não remover a camada protetora.



6 Utilize um borrifador ou **gotejador** para lubrificar as áreas articuladas. Movimente os alicates para facilitar a penetração do líquido.



10 Coloque a quantidade de **água destilada** no copo dosador e despeje diretamente na câmara da autoclave, conforme solicitado no Manual de Instruções do equipamento.



11 Com o suporte de envelopes na autoclave realize o ciclo de **esterilização** conforme as recomendações de uso. Observação: No modelo Vitale 5 litros, um suporte para 8 envelopes acompanha o equipamento. Para os modelos Vitale e Vitale CD, o suporte é um acessório vendido separadamente e comporta até 13 envelopes 9 x 26 cm no modelo 12 litros e 26 envelopes no modelo 21 litros, utilizando 2 suportes.



Autoclave Vitale 5 Litros

12 Após a despressurização (Autoclave Vitale 12/21 e Vitale 5 litros), entreabra a porta para secagem. Para as Autoclaves Vitale CD a secagem é automática com porta fechada. Aguarde a indicação "Esfriando" no display para abrir a porta.

DICA!

LUVAS GROSSAS

Depois do procedimento, não retire as luvas. Primeiro, lave-as com água e sabão, enxugue com papel toalha e desinfete-as com álcool 70%, somente então retire e guarde-as em local apropriado.

ATENÇÃO!

Autoclave é o equipamento mais recomendado para esterilização de instrumentos que resistam ao calor. Segura e fácil de operar, trabalha com ciclos entre 121° e 134° C de temperatura em presença de vapor e pressão. Entre em contato conosco pelo e-mail crc@crstofoli.com ou pelo Blog Biossegurança www.cristofoli.com/biosseguranca



Assista aos vídeos de **Instruções de Uso** e **dicas** sobre **biossegurança**.

BLOG
BIOSSEGURANÇA
— CRISTÓFOLI —
www.cristofoli.com/biosseguranca

WWW.CRISTOFOLI.COM


CRISTÓFOLI
BIOSSEGURANÇA